

# Comp Mist, Mabis

## Ultrakompaktni kompresorski inhalator

### FU (CW) 009

#### UPUTE ZA KORIŠTENJE

#### 1. UVOD

Hvala Vam na kupovini kompresorskog inhalatora. To je kompaktni medicinski uređaj napravljen da učinkovito primjeni lijekove propisane od strane Vašeg liječnika u bronhijalne prolaze u plućima. S pažljivom uporabom i njegom, pružit će Vam mnogo godina sigurnih tretmana.

Ovaj proizvod je razvijen za uspješno liječenje astme, alergija i ostalih respiratornih tegoba. Stvara struju zraka koja putuje kroz prozirnu cijev do raspršivača lijeka. Kada zrak uđe u raspršivač, pretvara propisani lijek u aerosolnu maglicu koja je laka za inhalaciju.

Vaš kompresorski inhalator treba se koristiti po uputama i nadzoru Vašeg liječnika ili terapeuta. Preporučujemo Vam da temeljito pročitate ovu knjižicu uputa kako biste se upoznali s mogućnostima uređaja. Bilo kakvo korištenje ovog uređaja van njegove namjene treba uvijek izbjegavati.

#### 2. DIJELOVI PROIZVODA

Maska za djecu i odrasle  
Prozirno crijevo  
Raspršivač  
Filteri  
Lulica za usta

#### 3. VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

Pročitajte sve upute pažljivo prije korištenja.

Slijedeće osnovne mjere opreza su potrebne kod korištenja električnih uređaja:

**OPREZ:** U slučaju nepažljivog postupanja može doći do ozljeda ili oštećenja uređaja.

Oprez pri korištenju uređaja:

1. Kako biste izbjegli električni udar: držite uređaj daleko od vode. Nemojte umočiti uređaj ili kabel u tekućinu. Ne koristite za vrijeme kupanja. Ne posežite za uređajem koji je pao u vodu – odmah isključite uređaj iz utičnice u zidu.
2. Nikad ne koristite uređaj ukoliko ima oštećenja (uključivši i kabel), ukoliko je pao ili bio potopljen u vodi. Odmah ga pošaljite u servis na pregled i popravak.
3. Uređaj se ne smije koristiti u blizini zapaljivih plinova, kisika ili aerosolnih sprejeva.
4. Isključite uređaj iz električne utičnice prije čišćenja, punjenja, i nakon svakog korištenja.
5. Ne koristite nastavke koje nije preporučio proizvođač.

Oprez pri radu:

1. Uključite ovaj uređaj na odgovarajući napon.
2. Ne ostavljajte uređaj da radi bez nadzora.
3. Nikad ne koristite uređaj ukoliko ima oštećen kabel ili utikač, ukoliko je pao, ili na drugi način bio u kontaktu s vodom, ili ukoliko ne radi ispravno. Vratite ga u servis na popravak.
4. Ukoliko se pojavi bilo koja nenormalnost u radu, odmah prestanite s radom sve dok se uređaj ne pregleda i popravi.
5. Uvijek izvucite utikač iz utičnice nakon korištenja.
6. Nikad ne zatvarajte otvore za zrak glavnog uređaja i ne stavljajte ga tamo gdje bi oni mogli biti blokirani.

Oprez pri skladištenju:

1. Ne čuvajte uređaj na direktnom udaru sunčevih zraka, visoke temperature ili vlage.

2. Čuvajte uređaj van dosega male djece.
3. Uvijek držite uređaj isključen dok nije u korištenju.

Oprez pri čišćenju:

1. Nemojte potapati uređaj u vodu. To može uništiti uređaj.
2. Isključite uređaj iz električne utičnice prije čišćenja.
3. Očistite sve potrebne dijelove nakon svakog korištenja prema uputama u ovoj knjižici.

#### **4. KORIŠTENJE VAŠEG KOMPRESORSKOG INHALATORA**

Prije prvog korištenja, inhalator je potrebno temeljito očistiti.

1. Stavite Vaš kompresorski inhalator na ravnu i stabilnu podlogu. Osigurajte da možete lako pristupiti svim kontrolama kad sjedite.

2. Otvorite poklopac

Važno: prije prvog korištenja, inhalator je potrebno pažljivo očistiti prema poglavlju «Čišćenje».

3. Nježno zaokrenite gornji dio raspršivača suprotno smjeru kazaljke na satu kako biste rastavili raspršivač.

4. Napunite donji dio raspršivača lijekom koji Vam je propisao Vaš liječnik .

5. Lagano zakrenite gornji dio u smjeru kazaljke na satu kako biste ponovno sastavili raspršivač. Pripazite da dva dijela dobro prilježu.

6. Utaknite jedan kraj prozirnog crijeva u bazu raspršivača.

7. Utaknite drugi kraj prozirnog crijeva na cijev koja se nalazi na prednjem dijelu inhalatora.

8. Priključite nastavak za usta ili masku na gornji dio raspršivača.

9. Uključite uređaj u utičnicu. Pripazite da je u ovom trenutku prekidač za paljenje uređaja u položaju «ugašeno».

10. Uključite uređaj pritiskom na tipku za paljenje. **Važno: Preporučljivo maksimalno vrijeme rada uređaja bez prekida je 10-15 minuta u suprotnom može doći do oštećenja motora i kompresora.**

Pripazite da otvori za zrak nisu začepljeni.

11. Kada je tretman završen, ugasite uređaj i isključite ga iz utičnice.

#### **5. ČIŠĆENJE**

Preporučljivo je da se raspršivač, nastavak za usta i maska temeljito očiste toplom vodom nakon svakog korištenja, te da se operu blagim deterdžentom nakon zadnjeg korištenja u danu. Ukoliko Vaš liječnik ili terapeut preporuči drugačiji način čišćenja, slijedite njihove upute.

Ispiranje (nakon svakog korištenja)

1. Odspojite prozirnu cijev, raspršivač, lulicu za usta i masku.

2. Lagano zakrenite raspršivač kako biste ga otvorili.

3. Isperite raspršivač, lulicu za usta i masku vodom.

4. Osušite ih čistim mekim ručnikom ili ih ostavite da se osuše na zraku.

5. Ponovno sastavite raspršivač kada je potpuno suh i stavite sve dijelove na suho, zatvoreno mjesto.

Dezinficiranje:

Molimo Vas da slijedite ove upute kako biste dezinficirali Vaš raspršivač, osim ako Vam nije drugačije preporučio Vaš liječnik. Preporuča se da se uređaj dezinficira na kraju svakog dana, po zadnjoj uporabi.

1. Koristite jedan dio alkoholnog octa s tri dijela destilirane vode. Osigurajte da je dovoljna količina otopine kako bi se moglo potopiti raspršivač, lulicu za usta i masku.

2. Provedite korake za ispiranje .

3. Operite raspršivač, lulicu za usta i masku u toploj vodi i blagom deterdžentu. Tada ih isperite vrućom vodom iz slavine.

4. Potopite te dijelove u otopinu octa i vode na trideset minuta.

5. Provedite korake ispiranja .

Čišćenje kompresora

1. Obrišite vlažnom krpom.
  2. Ne koristite sredstva za čišćenje u prahu ili bilo što grubo što bi moglo oštetiti uređaj.
- Promjena filtera
1. Ne koristite pamuk ili bilo koje druge materijale. Ne perite i ne čistite filter. Ne koristite uređaj bez filtera.
  2. Promijenite filter svakih 30 dana ili kad filter posivi.
  3. Procedura mijenjanja:
    - A) Uklonite poklopac filtera
    - B) Zamijenite iskorišteni filter novim.
    - C) Zatvorite poklopac filtera.

## **6. SPECIFIKACIJE**

NAPAJANJE	AC 230 V, 50 Hz
POTROŠNJA	0,8A
KAPACITET LIJEKA	5 ml
VELIČINA ČESTICA	0,5 – 10 µm
NIVO BUKE	60 dBA
PROSJEČNA RATA RASPRŠIVANJA	0,2 ml/min
PROTOK U LITRAMA	6 – 8 L/min
RADNA TEMPERATURA	10 °C do 40 °C
RADNA VLAŽNOST ZRAKA	10 do 95 % RH
TEMPERATURA SKLADIŠTENJA	-20 °C do 70 °C
VLAŽNOST ZRAKA PRI SKLADIŠTENJU	10 do 95 % RH
DIMENZIJE (D x Š x V)	30x15x10 cm
TEŽINA	2,1 kg

## **7. REZERVNI DIJELOVI**

Rezervni dijelovi mogu se nabaviti preko Vašeg prodavača. Uključuju: masku za djecu, masku za odrasle, prozirnu cijev za zrak, 10 filtera zraka, lulicu za usta, raspršivač.	
--	--