

## MASAŽER BODY

Hvala Vam na kupovini našeg novog ručnog masažera sa 3 promjenjive glave za masiranje.

Korištenjem ovog uređaja efikasno ćete ukloniti napetosti i opustiti se.

Svaka osoba reagira tijelom i kožom na grijanje i masažu drugačije. Vrijeme masaže, snaga pritiska i grijanje ovise o osobi i dijelu tijela koje se masira.

Osobe sa slijedećim stanjima ne bi trebale koristiti ovaj masažer:

sa ugrađenim pacemakerom, umjetnim zglobovima, šećernom bolešću, trudnice, bolesnici, tuberkulozni bolesnici, osobe koje imaju benigne ili maligne tumore, osobe s krvarenjima, trombozom, otvorenim ranama, masnicama, paraplegičari, stari i nemoćni, sa oštećenom kožom, varikoznim venama i neodređenom boli u listovima i drugim ozbiljnijim bolestima. Masažer ne koristiti u predjelu kičmenog stuba i vratnih arterija.

Za zaštitu od uplitanja kose u rotacionu glavu masažera obavezno koristiti nastavak sa mrežicom.

Masaža treba biti ugodna i udobna.

Uvijek se posavjetujte sa Vašim liječnikom ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi s korištenjem ovog masažera.

Ne držite masažer na jednom dijelu tijela duže vremena. Masažer treba koristiti stalnim pomicanjem, mijenjanjem područja masaže.

Važno: Ograničite korištenje masažera na 10-15 minuta odjednom.

Imena dijelova masažera

1. Potenciometar za odabir brzine
2. Površina za masažu: ravni nastavak
3. Površina za masažu: valoviti nastavak
4. Površina za masažu: nastavak s kotaćima
5. Zaštitna presvlaka za nastavke, periva

Upute za korištenje:

Pročitajte ove upute detaljno prije korištenja.

Provjerite da je napajanje 220 V i uključite uređaj.

Odaberite nastavak koji Vam najbolje odgovara.

Odaberite snagu masaže koja Vam odgovara.

Okrenite potenciometar za brzinu na MIN prvo i kontrolirajte snagu masaže. Ukoliko ga okrenete u desno, povećat ćete snagu.

Masirajte veliku površinu tijela i ne zadržavajte se dugo na jednom mjestu.

Vrijeme jedne masaže je ograničeno na 15 minuta.

Preporuka je masirati se jednom dnevno ili tri puta dnevno.

Molimo Vas da uređaj izvučete iz utičnice nakon korištenja.

Čistiti suhom krpom bez upotrebe deterdženata.

Ne koristite ga u kupatilu i drugim vlažnim prostorijama.

Obavezno čuvati od domašaja djece.

Specifikacije:

Napajanje : 220V , 50HZ

Vibracije : 2000 udaraca u minuti

Velčina : 16x18x10 mm

Vrijeme rada : 15 min.

Težina: 1 kg

Delta Medical d.o.o. Sarajevo, Hifzi Bjelevca 138, Bosna i Hercegovina, tel:033 635 003,